

機械器具 21 内臓機能検査用器具
 一般医療機器 一般的名称：心電計ケーブル及びリード 35562010


誘導コード中継リード線

【禁忌・禁止】

- ・MRIでのご使用はできません。[誘導起電力による局部的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

本品は誘導コードKPシリーズに接続して電極リード線です。

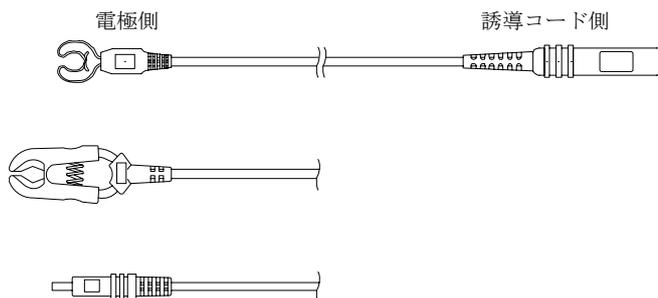

品番	電極側形状	包装
E-017A	クリップバネ	赤, 黄, 緑, 茶, 黒, 紫の6本で1組
E-018A	クリップ	赤, 黄, 緑, 茶, 黒, 紫の6本で1組
DL-02A	M2×0.4	赤, 黄, 緑, 黒, 白の5本で1組
DL-13A	M2×0.4	赤, 黄, 緑, 黒, 白×5の9本で1組

【使用目的、効能又は効果】

患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置です。本品はあるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付けます。

【品目仕様等】

項目	仕様
導通抵抗	5Ω以下
絶縁抵抗	DC1000V 100MΩ以上

【操作方法又は使用方法等】

- ・本品を誘導コードのチップ部に接続します。
- ・電極に本品の電極接続部を接続します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・KPシリーズ以外の誘導コードには接続しないでください。[重大な事故の原因となることがあります。]
- ・改造は、絶対に行わないでください。[重大な事故の原因となることがあります。]
- ・本品を誘導コードから抜くときや電極を外すときは、コードを持たずにコネクタ部を持って行ってください。[断線の恐れがあります。]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

使用温度 10～40℃

使用湿度 25～95%

【保守・点検に係る事項】

使用後は、中性洗剤または70%イソプロピルアルコールで清拭してください。

【包装】

表中参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 1-46-3

製造業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先

フクダ エム・イー工業株式会社 千葉事業所

千葉県流山市南流山 6-26-8

電話番号 04-7158-9011（代表）